

# NOVAZir® Fusion float ml

## Layer

| Schicht | Transluzenz | Festigkeit (MPA) | Schichtstärke |
|---------|-------------|------------------|---------------|
| 1       | 47 %        | > 800            | 23 %          |
| 2       | 46,5 %      | > 850            | 18 %          |
| 3       | 46 %        | > 900            | 18 %          |
| 4       | 45 %        | > 1000           | 18 %          |
| 5       | 44 %        | > 1100           | 23 %          |

## Sinterinformation

| NOVAZir® Fusion float ml |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Stage 1</b>           | 7 °C / min        |
|                          | 900 °C            |
|                          | keine Haltezeit   |
| <b>Stage 2</b>           | 3 °C / min        |
|                          | 1300 °C           |
|                          | keine Haltezeit   |
| <b>Stage 3</b>           | 5 °C / min        |
|                          | 1480 °C           |
|                          | 120 min Haltezeit |
| <b>Stage 4</b>           | 10 °C / min       |
|                          | 960 °C            |
|                          | keine Haltezeit   |

